


新型コロナウイルス (SARS-CoV-2 核酸検出)

唾液による検体採取・提出方法について

★送付内容

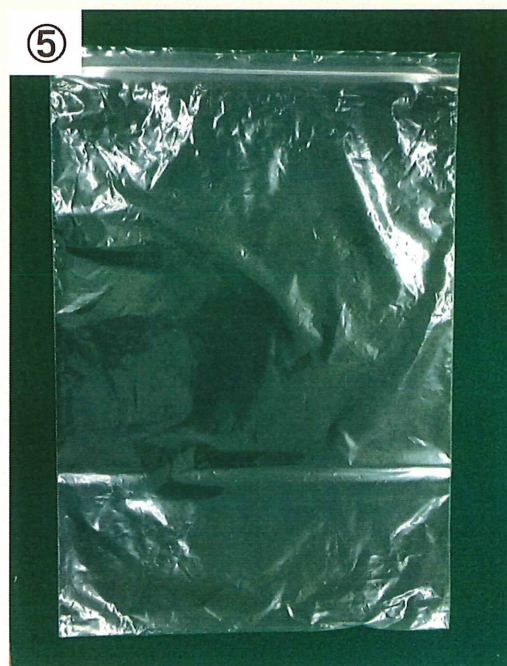

⑤ 二次梱包容器



⑥ 三次梱包容器

いわき保健所監修

★一次容器（唾液採取容器）

- 右図を参考に唾液を採取してください。
- 唾液採取後、容器の消毒を行い、
下記のようにネームラベル を貼付してください。



PCR 検査 だ液の採取方法

- だ液を採取する前は、歯磨きや飲食・喫煙をしないでください。
- だ液は線の位置まで入れてください。(1 mL ~ 2 mL)
- 容器の外にだ液がつかないように注意してください。
- 容器は滅菌済みです。
だ液の採取以外では、ふたを開けないでください。

ストローでの採取方法（だ液採取セット）

- ふたを開けて
ストローを取り出します。


- ストローをくわえ、
容器の中にだ液が自然に流れるように
溜めてください。


- 容器にストローを入れ
ふたをしっかり閉めてください。


だ液は
線まで入れる



江東微生物研究所

★検体の二次梱包について

- ・採取した容器を下記のように検体ラックへ並べてください。
- ・検体ラックを二次梱包容器（チャック付袋）へ収納してください。
（チャックは密封するようお願いします）

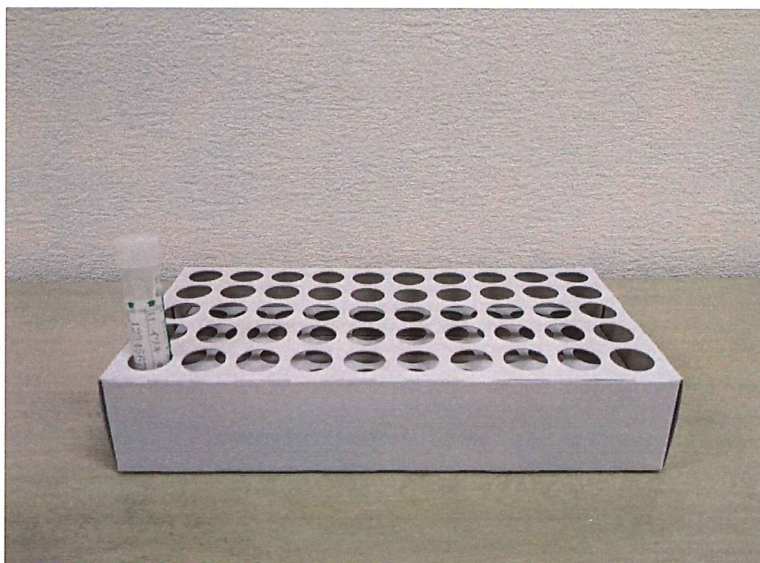

★ 検体の三次梱包について

- ・三次梱包容器（発砲スチロール）へ、二次梱包した**検体容器**と**保冷剤**を収納してください。
- ・三次梱包容器はガムテープ等で蓋を閉めるようお願いします。

